


Procedimento de Coleta do Teste de Farmacogenética

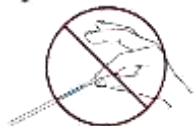

1. Não toque no algodão cotonete;
Não remova a ponta do cotonete;
Não troque por outro tipo de cotonete.



2. Preencha os dados da etiqueta do invólucro pequeno:
 - Name (Nome completo);
 - DBO (Data de Nascimento);
 - Date of Collection (Data da Coleta);
 - Time of Collection (Hora da Coleta).



3. Permaneça 30 min. sem se alimentar e antes de coletar, faça um enxague bucal com água filtrada.



4. Retire um cotonete da embalagem com o cuidado para não tocar na ponta.



5. Raspe o cotonete com bastante vigor por pelo menos 30 vezes de cada lado do interior da bochecha.



6. Coloque o cotonete dentro do envelope em que você está identificado, mas não feche o envelope.



7. Retire o segundo cotonete e repita o mesmo procedimento descrito no item 5.



9. Guarde o cotonete dentro do envelope junto com o outro cotonete e lacre.



10. Coloque o envelope lacrado com os dois cotonetes e o saquinho gel pack (é muito importante este saquinho para proteger a amostra contra umidade) dentro saco plástico “zip lock” e em seguida no envelope branco pré-endereçado para a ConectGene.